



LABORMITTEILUNG

Institut für Klinische Chemie
und Pathobiochemie

Prof. Dr. med. Berend Isermann
Direktor



Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.
Leipziger Str. 44
39120 Magdeburg

Telefon: +49 391 67-13919
Telefax: +49 391 67-13902

ikcp@med.ovgu.de
www.ikc.ovgu.de

Labormitteilung 05/2015 vom 14.08.2015

Beeinträchtigungen durch Lagerungsschäden bei Trenngelröhrchen

Aus gegebenem Anlass möchten wir alle Stationen/Ambulanzen darauf hinweisen, dass die BD Vacutainer mit Gelzusatz nicht in warmen Räumen über 25°C und auf keinen Fall in der Sonne gelagert werden dürfen.

Durch die anhaltende sommerliche Hitze hat sich das Gel in vielen Röhrchen zersetzt und vermischt sich mit dem Plasma/Serum. Dies kann ein mehrfaches Zentrifugieren erforderlich machen und damit zu einer erheblichen Verzögerung in der Bearbeitung führen. In seltenen Fällen kann die Probe gar nicht bearbeitet werden und erfordert dann eine erneute Blutentnahme.

Die Firma BD empfiehlt eine Lagerung bei max. 25 °C.

Wir bitten um Beachtung und bedanken uns für Ihre Bemühungen.

Dr. I. Päge

Prof. Dr. med. B. Isermann